

Handleiding voor het versturen van monsters

12-2023

Goede monstername is van belang. Kies daarom het meest geschikte diagnostisch middel en verzendmethode. Met betrekking tot de verpakking en het vervoer van biologisch materiaal voor diagnostiek (UN3373) gelden strenge Europese regels:

Voor verzending van biologisch materiaal is altijd een drievoudige verpakking noodzakelijk, bestaande uit:

1. Een lekdichte primaire verpakking (swab, petriplaat, buisje, flesje, etc.).
2. Een lekdichte secundaire verpakking.
3. Een buitenverpakking die voldoende stevig is voor de materialen die erin zitten en het transport waaraan het wordt blootgesteld. Hiervoor kan bijvoorbeeld een doos worden gebruikt.

Bij vloeistoffen is het verplicht voldoende absorberend materiaal te gebruiken, dat geplaatst moet worden tussen de primaire en secundaire verpakking. Dit geldt ook voor materialen waar vocht uit kan lekken (bijv. organen).

Serviceproducten verkrijgbaar bij Dopharma

Serviceproducten Diagnostiek		Artikelnummer
Biopsy punch 8 mm groen (20 st)		50700231
eSwab (borstelswab, afbreekbaar voor transport in medium)		50700223
Mestpotje		50700220
Mycoplasma transportmedium 3,1 ml		50700221
Verzenddoos Diagnostiek NEOPOR® 7,3 L, 330x225x225 mm		58000441
Verzenddoos Diagnostiek NEOPOR® 12,5 L, 350x350x300 mm		58000442
Verzendset Diagnostiek Klein, 3 stuks		58000443

Z.O.Z.

Bewaring

De monsters kunnen het beste volgens de informatie in de sample collection overzichten per diersoort bewaard worden.

Transport

Onze ophaaldienst kan de monsters ophalen op een adres naar keuze op voorwaarde dat zij verpakt zijn zoals hierboven beschreven (volgens Europese regelgeving).

Kosten op aanvraag.

Verwittig het TS team op TS@dopharma.com uiterlijk de dag voordat de monsters opgehaald kunnen worden. Wij regelen dat het pakket de gewenste dag op het aangegeven adres opgehaald zal worden.

Gegevens nodig voor het ophalen van de monsters:

- Inzendformulier diagnostiek (www.dopharma.nl/form).
- Soort monster, incl. grootte en type verpakking.
- Ophaaladres.
- Telefoonnummer van dierenarts / veehouder verantwoordelijk voor het monster.
- Tijdstip waarop het monster beschikbaar is.